

Toepassingsgebied

Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van weefsel (biopten, excisies, curettementen etc.) voor histologisch onderzoek vanuit de huisartsenpraktijken naar Pathologie Friesland.

Doel

Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe weefsel voor histologisch onderzoek op de juiste manier te behandelen en op te sturen.

Door het materiaal op de juiste manier in te zenden, komt het in optimale conditie binnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling van de patiënt.

Als het ingezonden materiaal op de juiste wijze is verpakt, afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat worden ingevoerd in ons laboratorium-informatiesysteem.

Als gegevens niet compleet zijn, zijn we genooddaakt contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het onderzoek vertragen.

Instructie

- Doe het materiaal in een met 10% gebufferd formaline gevuld potje.
- Sluit het potje goed af; draai het deksel goed dicht!
- Voorzie het potje van naam en geboortedatum van de patiënt, aard van het materiaal en van een nummering bij meerdere potjes.
- Plaats het potje in het gripzakje, omwikkel het potje eventueel met vochtabsorberend materiaal.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier in het zijvakje van het gripzakje.
- Potje niet in koelkast bewaren!

Het onderzoeksmateriaal wordt volgens transportschema door een chauffeur van Pathologie Friesland/Izore bij u opgehaald.

Bijbehorende documenten

[Pathologie-onderzoek voor huisarts, aanvraagformulier.](#)

Opmerkingen

Potjes met formaline, aanvraagformulieren, gripzakjes en naamstickers zijn te bestellen via de website van Pathologie Friesland www.pathologiefriesland.nl.

Voor vragen of spoedaanvragen kunt u contact opnemen via e-mail pathologie@pathologiefriesland.nl of met de frontoffice, tel. 058 293 93 93.