

Liquor, inzendrichtlijn (Versie 3)

Toepassingsgebied

Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van liquor voor cytologisch onderzoek vanuit de ziekenhuizen naar Pathologie Friesland.

Doel

Dit document is een richtlijn voor aanvragers hoe liquor voor cytologisch onderzoek op de juiste manier te behandelen en op te sturen.

Door het materiaal op de juiste manier in te zenden, komt het in optimale conditie binnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling van de patiënt.

Als het ingezonden materiaal op de juiste wijze is verpakt, afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat worden ingevoerd in ons laboratorium-informatiesysteem.

Als gegevens niet compleet zijn, zijn we genoodzaakt contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het onderzoek vertragen.

Instructie

Liquor onderzoeksmateriaal kan op verschillende wijze worden ingestuurd:

- A. Alleen als cytospin preparaten.
- B. Als cytospin preparaten en als liquor vocht.
- C. Alleen als liquor vocht^{1*}.

^{1*}In verband met de snelle degeneratie van de cellen, is het belangrijk dat zo spoedig mogelijk na afname van de liquor cytospin preparaten worden gemaakt. Stuur liquor onderzoeksmateriaal daarom liever niet alleen als vocht in.

Aanvrager

A. Alleen als cytospin preparaten

- Vang het vocht op in een schoon buisje, zonder toevoegingen.
- Voorzie het buisje van naam en geboortedatum van de patiënt.
- Lever het onderzoeksmateriaal en het volledig ingevulde aanvraagformulier Speciële cytologie af bij het Klinisch Chemisch Laboratorium van uw ziekenhuis.

B. Als cytospin preparaten en als liquor vocht

- Vang het vocht op in een schoon buisje, zonder toevoegingen.
- Voorzie het buisje van naam en geboortedatum van de patiënt.
- Lever het onderzoeksmateriaal en het volledig ingevulde aanvraagformulier Speciële cytologie af bij het Klinisch Chemisch Laboratorium van uw ziekenhuis.

C. Alleen als liquor vocht

- Vang het vocht op in een schoon buisje, zonder toevoegingen.
- Voorzie het buisje van naam en geboortedatum van de patiënt.
- Plaats het buisje in het gripzakje met een vochtabsorberend doekje.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier Speciële cytologie in het zijvakje van het gripzakje.
- Geef het onderzoeksmateriaal met aanvraagformulier af op de afgifteplaats van het ziekenhuis (in transportbak Pathologie Friesland).

Klinisch Chemisch Laboratorium

A. Alleen preparaten

- Maak 6 cytospin preparaten.
- Laat de preparaten aan de lucht drogen.
- Schrijf met potlood op het matte gedeelte van de glaasjes de naam en geboortedatum van de patiënt.
- Doe de glaasjes in een coupemapje.

- Plaats de coupemapjes in het gripzakje.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier Speciële cytologie in het zijvakje van het gripzakje.
- Geef het onderzoeksmateriaal met aanvraagformulier af op de afgifteplaats van het ziekenhuis (in transportbak Pathologie Friesland).

B. Preparaten en vocht

- Maak 6 cytospin preparaten.
- Laat de preparaten aan de lucht drogen.
- Schrijf met potlood op het matte gedeelte van de glaasjes de naam en geboortedatum van de patiënt.
- Doe de glaasjes in een coupemapje.
- Plaats de coupemapjes in het gripzakje.
- Plaats het buisje in het gripzakje met een vochtabsorberend doekje.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier Speciële cytologie in het zijvakje van het gripzakje.
- Geef het onderzoeksmateriaal met aanvraagformulier af op de afgifteplaats van het ziekenhuis (in transportbak Pathologie Friesland).

Bijbehorende documenten

[Aanvraagformulier Speciële Cytologie.](#)

Opmerkingen

Bij tussentijdse opslag: buizen met vocht in de koelkast en glaasjes/preparaten buiten de koelkast bewaren.

Aanvraagformulieren en gripzakjes zijn te bestellen via de website van Pathologie Friesland

www.pathologiefriesland.nl .

Voor vragen of spoedaanvragen kunt u contact opnemen via e-mail pathologie@pathologiefriesland.nl of met de frontoffice, tel. 058 293 93 93.