

## Punctiemateriaal, sputum, tepelvocht huisartsen, inzendrichtlijn (Versie 5)

### Toepassingsgebied

Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van punctiemateriaal, sputum en tepelvocht voor cytologisch onderzoek vanuit de huisartsenpraktijken naar Pathologie Friesland.

### Doel

Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe punctiemateriaal, sputum en tepelvocht voor cytologisch onderzoek op de juiste manier te behandelen en op te sturen.

Door het materiaal op de juiste manier in te zenden, komt het in optimale conditie binnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling van de patiënt.

Als het ingezonden materiaal op de juiste wijze is verpakt, afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat worden ingevoerd in ons laboratorium-informatiesysteem.

Als gegevens niet compleet zijn, zijn we genooddaakt contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het onderzoek vertragen.

### Instructie

#### Vorbewerking materiaal

##### Punctiemateriaal

- Spuit het materiaal uit op glaasjes en strijk het uit (max 2 glaasjes).
- Laat de preparaten aan de lucht drogen.
- Schrijf met potlood op het matte gedeelte van de glaasjes de naam en geboortedatum van de patiënt.
- Doe de glaasjes in een coupemapje.
- Spuit het restmateriaal uit in Sarstedt® buis met unifix (1:1).
- Voorzie het matte deel van de Sarstedt® buis met potlood van naam en geboortedatum patiënt.

##### Sputum

- Vang het onderzoeksmateriaal op in een Sarstedt® buis, alcohol 96% toevoegen (1:1)
- Voorzie het matte deel van Sarstedt® buis met potlood van naam en geboortedatum van de patiënt.

##### Tepelvocht

- Bij tepeluitvloed kan de tepel gedept worden op een objectglaasje, hierna het glaasje laten drogen aan de lucht en pas als het materiaal gedroogd is in een coupe-doosje doen. Schrijf met potlood op het matte gedeelte van de glaasjes de naam en geboortedatum van de patiënt.
- Bij overvloedig tepelvocht kan dit zondig opgevangen worden in een Sarstedt® buis.
- Voorzie het matte deel van Sarstedt® buis met potlood van naam en geboortedatum van de patiënt.

##### Inzenden

- Plaats de Sarstedt® buis en/of coupemapje in het gripzakje met een vochtabsorberend doekje.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier Pathologie-onderzoek voor huisarts in het zijvakje van het gripzakje.
- Geef het onderzoeksmateriaal met aanvraagformulier mee met de chauffeur van Pathologie Friesland.
- Bij tussentijdse opslag: Sarstedt® buis in koelkast en glaasjes/preparaten buiten koelkast bewaren.

### Bijbehorende documenten

[Aanvraagformulier Pathologie-onderzoek huisarts.](#)

### Opmerkingen

Aanvraagformulieren, gripzakjes en Sarstedt® buizen zijn te bestellen via de website van Pathologie Friesland

[www.pathologiefriesland.nl](http://www.pathologiefriesland.nl) .

Voor vragen of spoedaanvragen kunt u contact opnemen via e-mail [pathologie@pathologiefriesland.nl](mailto:pathologie@pathologiefriesland.nl) of met de frontoffice, tel. 058-293 93 93.