

Brush, inzendrichtlijn (Versie 6)

Toepassingsgebied

Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van brushmateriaal voor cytologisch onderzoek vanuit de ziekenhuizen naar Pathologie Friesland.

Doel

Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe brushmateriaal voor cytologisch onderzoek op de juiste manier te behandelen en op te sturen.

Door het materiaal op de juiste manier in te zenden, komt het in optimale conditie binnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling van de patiënt.

Als het ingezonden materiaal op de juiste wijze is verpakt, afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat worden ingevoerd in ons laboratorium-informatiesysteem.

Als gegevens niet compleet zijn, zijn we genooddaakt contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het onderzoek vertragen.


Instructie

Aard brushmateriaal en voorbereiking

Bronchusbrush	:	zie website Pathologie Friesland: Inzendrichtlijnen ziekenhuis Pathologie Friesland , inzendrichtlijnen cytologie, Long
Ductus choledochus	:	borsteltje van de afgenomen brush opsturen in DLC (Dunne Laag Cytologie) potje. Geen glaasjes opsturen.
Oesophagus	:	materiaal op glaasjes uitstrijken (max. 2 glaasjes) en aan de lucht laten drogen. borsteltje evt. toevoegen in DLC potje.
Vagina	:	zie website Pathologie Friesland Inzendrichtlijnen ziekenhuis Pathologie Friesland , inzendrichtlijnen cytologie, Baarmoederhals- en vaginuitstrijken (DLC).

Bewerken en inzenden bronchusbrush- en ductus choledochus materiaal

- Verwijder voor aanvang van het longonderzoek de plastic bescherming van het DLC deksel (zie foto 1 hieronder).
- Knip (na brushing luchtweg) de bronchus brush af en vang dit op in een DLC potje (zie foto 2 hieronder). Wanneer er op verschillende plaatsen wordt gebrusht bij bronchusbrush (b.v. LOK / LBK) deze afzonderlijk opsturen in verschillende DLC potjes. **Geen glaasjes opsturen.**
- Draai de deksel dicht. Streepje deksel moet overeenkomen met streepje op het potje (zie foto 3 hieronder).
- Schud het potje 5 tot 10 seconden krachtig.
- Voorzie het DLC potje met patiëntgegevens (sticker is een pré).
- Plaats het potje in het gripzakje met een vocht absorberend doekje.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier Speciële cytologie in het zijvakje van het gripzakje.
- Geef het onderzoeksmateriaal met aanvraagformulier af op de afgifteplaats van het ziekenhuis (in transportbak Pathologie Friesland).
- Bij tussentijdse opslag: Potje in koelkast bewaren.

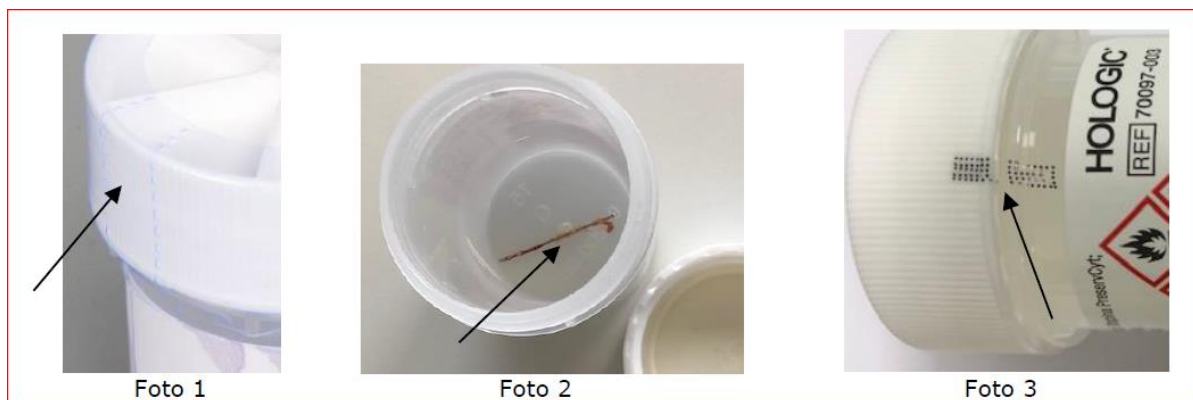

Bewerken en inzenden oesophagus

- Schrijf met potlood op het matte gedeelte van de glaasjes de naam en geboortedatum van de patiënt.
- Doe de glaasjes in een coupemapje.
- Voorzie het DLC potje met patiëntgegevens (sticker is een pré).
- Plaats potje en/of glaasjes in het gripzakje met een vochtabsorberend doekje.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier Speciële cytologie in het zijvakje van het gripzakje.
- Geef het onderzoeksmateriaal met aanvraagformulier af op de afgifteplaats van het ziekenhuis (in transportbak Pathologie Friesland).
- Bij tussentijdse opslag: Potje in koelkast bewaren.

Bijbehorende documenten

Voor [Aanvraagformulier Speciële Cytologie](#) zie website Pathologie Friesland: [Aanvraagformulieren ziekenhuis | Pathologie Friesland](#) of gebruik het geprint digitaal aanvraagformulier voor cytologisch onderzoek van eigen ziekenhuis.

Opmerkingen

DLC potje fixatief is een op methanol gebaseerd medium (geen formaldehyde).

Aanvraagformulieren, gripzakjes en DLC potjes (1 tray dunne laag per bestelling) zijn te bestellen via de website van Pathologie Friesland: www.pathologiefriesland.nl.

Voor vragen of spoedaanvragen kunt u contact opnemen via e-mail pathologie@pathologiefriesland.nl of met de frontoffice, tel. 058 293 93 93.